

מדריך שימוש והפעלה ASU-1

מדריך שימוש והפעלה לצוותים רפואיים"



התקנה

שלב 1:
חיבור מיכל האיסוף




שלב 2:
חיבור צינוריות ופילטר

צינורית חיבור
1

צינורית חיבור
2

פילטר

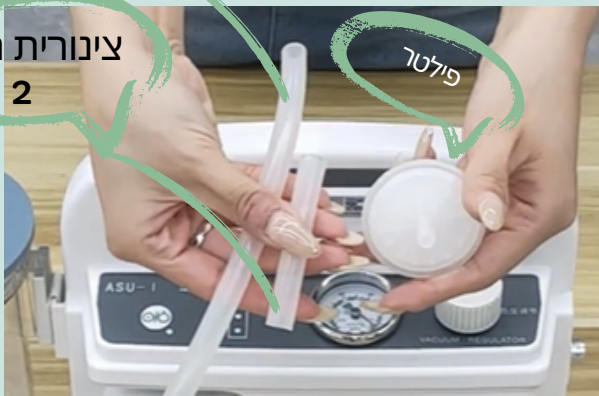

• החלק את תפס מיכל האיסוף לתוך
החריץ בצד שמאל של יחידת
השאיבה.

• וודא שהמיכל יושב בצורה יציבה.



- חבר את צינורית צינורית חיבור 1 לפילטר האוויר וליחידת השאיבה
- חבר את צינורית צינורית חיבור 2 למיכל האיסוף ולפילטר האוויר

צינורית חיבור
2



צינורית חיבור
1

שלב 3:
חיבור צינורית למטופל





- חבר את צינורית החיבור למטופל (עם מחבר כחול) למיכל האיסוף.




- חבר את הקצה השני של הצינורית לציאה המתאימה ביחידת השאיבה.




שלב 4: הפעלה

- לחץ על כפתור ההפעלה.
נורית ירוקה תציין שהמכשיר פועל.

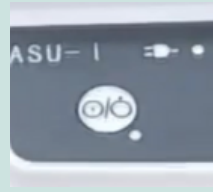


שלב 5: ויסות עוצמת השאיבה

- סובב את כפתור ויסות הוואקום כדי לכוון את עוצמת השאיבה.
- עוצמה נמוכה מומלצת לילדים ותינוקות.

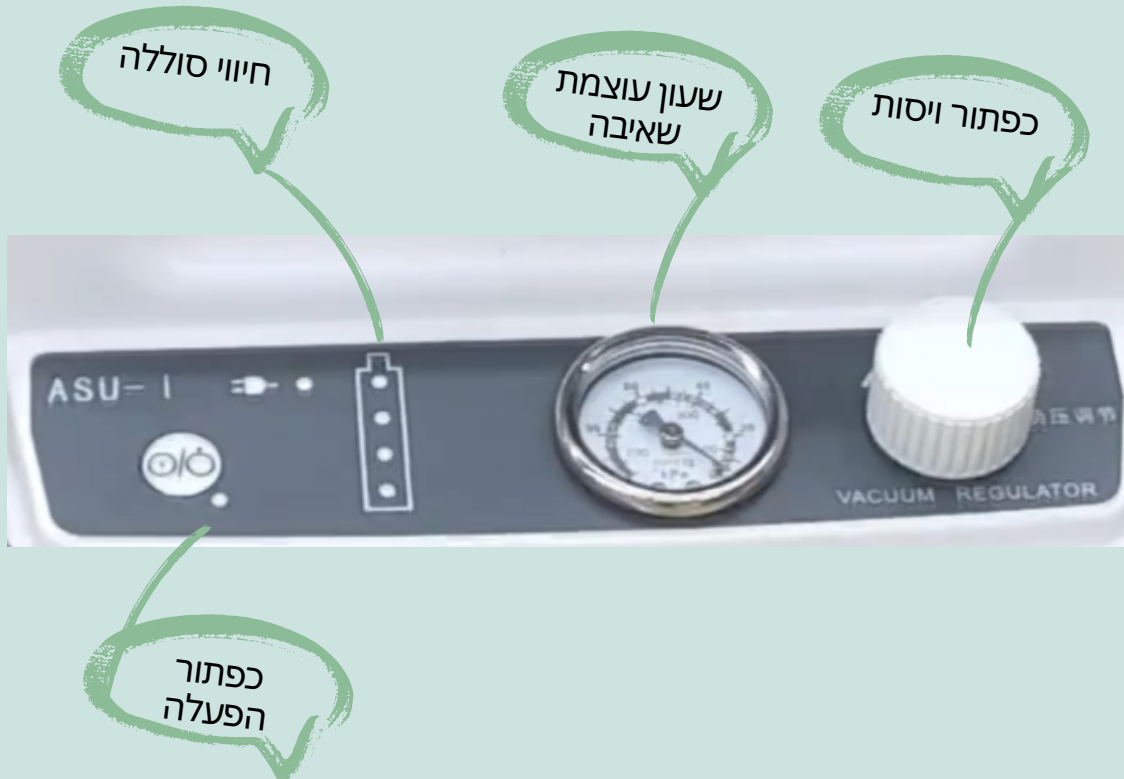

חיבור לחשמל

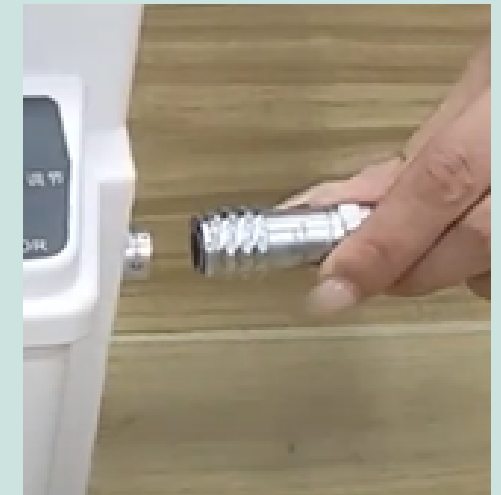

על הכבל ועל החיבור לטעינה יש נקודה בחיבור הן צריכות להיות אחת מול השניה